

eco medical Desinfektionstücher sensitiv



Produktbeschreibung

Eco medical Desinfektionstücher sensitiv sind fertig getränkte Tücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen medizinischem Inventar und Flächen.

Produkteigenschaften

- Alkoholfreie und gebrauchsfertige Desinfektionstücher auf der Basis von modernen quartären Ammoniumverbindungen
- Tränkflüssigkeit geprüft nach den Richtlinien der DGHM/VAH
- Tränkflüssigkeit dermatologisch getestet
- Für Arcylglas geeignet

Anwendungsbereichen

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.
Gem. Biozidrichtlinie: Desinfektion und Reinigung vom medizinischem Inventar und Flächen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia inaktivierend.

Dosierung und Art der Anwendung

Anwendungsgebiete	
Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, HBV, HIV, HCV, BVDV und Vaccinia-Viren-inaktivierend.	
Einwirkzeit gem DGHM/VAH-Gutachten für Bakterien und Pilze sowie behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV, BVDV und Vaccinia-Viren:	1 Min.

Hinweis:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit eco medical Desinfektionstücher sensitiv Etikett!

Hinsichtlich Verfallsdatum und Chargennummer gelten immer die auf dem Nachfüllbeutel aufgedruckten Informationen.

Warnhinweis:

Entzündlich. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Gutachten

	Gutachten
	Listung der Tränkflüssigkeit eco medical Schnelldesinfektion sensitive

Zusammensetzung

100 g der Tränkflüssigkeit enthalten:
 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
 0,5 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

Lieferformen

Einzelabpackung	Lieferformen	Art.-Nr.
100 Blatt Dose		6107
100 Blatt Refill		6108

Schug Medical

Karlsplatz 10
92676 Eschenbach

Tel.: 0800-2012333
Fax: 0800-2012777

info@schug-medical.de
www.schug-medical.de