

# eco medical Flächendesinfektion AF

MRSA wirksam

Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen



## Produktbeschreibung

Eco medical Flächendesinfektion ist ein Präparat, das in allen Bereichen einsetzbar ist. Durch extrem hohe Materialverträglichkeiten, ein umfassendes Wirkungsspektrum und seine Geruchsneutralität bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit.

## Produkteigenschaften

- reinigungsstark
- keine Geruchsbelästigung
- pflegt Linoleum und PVC

## Anwendungsbereich

**Gem. MPG:** Zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen.

## Wirkungsspektrum

- Bakterizid inkl. MRSA
- Levurozid
- Tuberkulozid
- virusinaktivierend inkl. HBV, HIV, BVDV, HCV und Vakzinia-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung).

## Anwendungsgebiete

Bakterizid, levurozid gem. DGHM/VAH (bei hoher Belastung)

## Dosierungen und Einwirkzeiten

0,5 % (5 g/L) – 60 min.  
0,75 % (7,5 g/L) – 15 min.  
1 % (10 g/L) – 5 min.

## Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung:

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



ätzend



umweltgefährlich

## Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 16 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

## Lieferformen

Einzelabpackung  
5 l Kanister  
Art.-Nr.  
6109

Schug Medical

Karlsplatz 10  
92676 Eschenbach

Tel.: 0800-2012333  
Fax: 0800-2012777

info@schug-medical.de  
www.schug-medical.de